

PDT LED MACHINE

ГНУЧКА LED-ТЕРАПІЯ

BH_PDT01

150 LED-ДІОДІВ x4 = 600 ДЖЕРЕЛ СВІТЛА



Багатофункціональний косметологічний апарат зі **150 світлодіодами у 4 секціях (разом 600 джерел світла)**. Конструкція гнучка та портативна: може складатися, фіксуватися нейлоновим ременем і адаптуватися під різні зони тіла. Конфігурація дозволяє використовувати апарат для процедур у положенні сидячи чи лежачи.

Підтримується робота у 4 світлових режимах: **червоне, синє, жовте та комбіноване двосмугове** світло. До кожного з перелічених світлових режимів можна додати **інфрачервоне** світло. Обираючи правильну довжину хвилі та режим роботи, ви отримуєте широкий спектр косметологічних ефектів: покращення тону, освітлення, вирівнювання текстури, зменшення запалення, пришвидшення загоєння тощо.

Інтенсивність світла можна налаштувати залежно від потреб клієнта. Апарат має таймер, що дозволяє обирати тривалість сесії від 10 до 30 хв. Цей апарат працює від літій-іонного акумулятора.

ЧЕРВОНЕ СВІТЛО: 630 nm

Робота з підгострими та хронічними запальними станами шкіри (атопічний дерматит, акне, розацеа, псоріаз), підтримка при ранах, що повільно загоюються, та сверблячих дерматозах. Зменшення вираженості зморщок, підвищення еластичності шкіри, уповільнення процесів старіння, покращення мікроциркуляції. Підтримка протоколів роботи з алопецією

СИНЄ СВІТЛО: 460 nm

Має антибактеріальний ефект, зменшує запалення, підходить при акне, подразненнях, постзапальних змінах, стабілізує роботу сальних залоз.

ЖОВТЕ СВІТЛО: 590 nm

Підвищує еластичність, зменшує почервоніння та подразнення, підходить для чутливої шкіри, покращує бар'єрну функцію.

ІНФРАЧЕРВОНЕ СВІТЛО: 850 nm

Глибока стимуляція тканин, посилює клітинне відновлення, покращує кровообіг, підсилює ефект інших довжин хвиль.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Очистити та підготувати шкіру обличчя, шиї або тіла.
2. Ідеально використання світла на підготовлену та очищену шкіру. Якщо ви вирішили використати будь які препарати разом зі світлом – проконсультуйтеся у виробника косметичних засобів про сумісність косметики та світла.
3. Обрати варіант використання апарату у положенні сидячи чи лежачи.
4. Надягнути захисні окуляри для клієнта (Клієнт лежить або сидить, LED панель розташована над чи перед обличчям. Використання захисних окулярів обов'язкове!).
5. Увімкніть апарат, оберіть режим та інтенсивність світлової хвилі. Налаштуйте тривалість сесії за допомогою таймера.
6. Вимкніть апарат, завершити процедуру нанесенням сироваток та кремів за типом шкіри.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Світлодіоди: **150 LED-діодів x4 = 600 джерел світла**

Діапазон щільності потоку випромінювання (irradiance): **40–150 мВт/см²**

Енергетична доза (energy dose): **165 Дж/см²**

Таймер: **10/15/20/25/30 хв**

Специфікація заряджання: **5V / 1A**

Основні матеріали: **ABS / Силікон**

Час заряджання: **2-3 години**

Метод заряджання: **Type-C**

Розмір коробки: **310 × 178 × 270 мм**

Вага: **1050 г**

Батарея: **Li-ion акумулятор 7.4V 1600 mAh**

Вихідна потужність: **5W**

Вхідна потужність: **8W**

Країна походження: **Китай**

Гарантія: **12 місяців**



СЕРТИФІКОВАНО В УКРАЇНІ